

关于阴茎种植体的患者常见问题



我的阴茎会有所不同吗？其他人是否会注意到阴茎种植体？

一旦植入到位，别人是完全察觉不到您的阴茎种植体的。它完全隐藏在体内。除非您告诉他们，否则没人会知道 - 即使在更衣室里也是如此。

勃起过程会造成疼痛吗？

使阴茎种植体勃起时，请挤压阴囊中的液泵，将液体注入阴茎的圆柱体中。这需要良好的手动技巧，但不应感到痛苦。如果您感到疼痛，请与您的医生联系。¹

我的性伴侣会怎么想呢？

充液后，与自然勃起一样，种植体会使阴茎变得坚挺。只要需要，您就能一直保持勃起状态。而且，您仍然可以享受同样的亲密经历。通常，射精和性感觉均与植入前的感觉相似。²

我需要去专家处植入阴茎种植体吗？

最终，您需要去看勃起功能障碍专家。首先，您可以与您的初级保健医生讨论勃起功能障碍的治疗方法。然后，您需要与具有各种勃起功能障碍治疗经验（包括阴茎种植体）的勃起功能障碍专家或诊所讨论您的情况。¹

查找您所在地区内的专家



阴茎种植体手术是如何进行的？

阴茎种植体手术一般需要一个多小时左右。通常，阴茎种植体手术仅需要短期住院。

在您处于麻醉的状态下，在阴茎根部或阴囊上造一个小切口，然后，通过该切口植入阴茎种植体。在康复过程中，大多数男性仅会感到轻微的不适。¹

勃起功能障碍手术后需要多久的恢复时间？何时可以进行性交？

在勃起功能障碍种植体手术的当天，大多数男性就可以回家，并在一周之内恢复各种正常活动，通常，在术后6周左右就可以进行性交活动。¹


..... 下页续

一个种植体可以持续使用多久？我是否需要对其进行更换？

特定种植体在特定患者体内的作用时间无法预测。与任何医疗器械一样，阴茎种植体会随着时间的流逝而出现磨损和机械故障。要延长种植体的使用寿命，请遵循泌尿科医生的建议。

我的种植体会影响机场安检吗？

种植体不会对您的差旅和机场安检的通过造成影响。当然，膝关节或髋关节等种植体内含有金属，则会被探测棒或穿行式扫描仪检测到。因为大多数可膨胀式阴茎种植体含有极少的金属零件，所以不会触发金属探测器。但是，某些不可膨胀式阴茎种植体会含有更多的金属。您会收到一张患者身份证明，表明您是医疗器械使用者。为避免此类情况，请随身携带该证明。

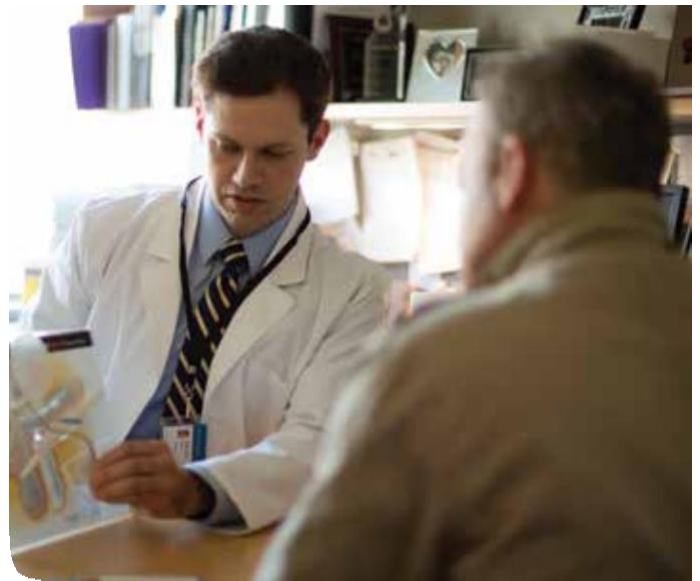

植入阴茎种植体会有一些风险？

因为每种种植体都具有独特的功能，所以您需要与医生讨论每种器械的风险与益处。然后，选择最适合您的方案。

如需查看重要的安全信息、乳胶信息和MRI信息，请访问：www.HARDFacts.com.au

查找您所在地区内的专家



参考文献

1. AMS 700™ Patient Manual. Information and Instructions for Patients Considering an Inflatable Penile Prosthesis. American Medical Systems, LLC. 2012.
2. Penile Implants-Erectile Dysfunction. Sex Health Matters Website: <http://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/penile-implants-erectile-dysfunction/P7>. Accessed December 3, 2014.

本出版物由波士顿科学公司出版，该公司致力于通过创新医疗解决方案来改善全球患者的健康，从而改善生活。

**Boston
Scientific**

波士顿科学有限公司
Suite 5.01, 247 Coward Street Mascot
NSW 2020 Australia
www.bostonscientific.com
客户服务电话：1800 676 133
© 2016年，波士顿科学公司或其附属公司。
版权所有！
ANZ_PSST_16193 AA 2016年10月